

## **Retraxil - Gyakori kérdések**

### **Applikáció**

#### **Mi a Retraxil indikációs területe?**

A Retraxil egy asztringens retrakciós paszta. A pasztát az analóg és a digitális lenyomatvételek, az ideiglenes és végleges restaurációk rögzítése során, valamint a II. és V. osztályú kavitások ellátása során végzett lágyrész managementhez, a marginális gingiva fogtól való ideiglenes eltávolítására és a gingivális sulcus szárítására alkalmazható.

#### **Mikor nem kell a Retraxilt használni?**

A termék használata ellenjavallt minden olyan esetben, amikor a termék összetevőivel szemben ismert allergia áll fenn. Továbbá peridontális betegségek esetén, furcatio expozíció és szabadon álló csontfelszín előfordulása esetén a Retraxil használata nem javallt.

#### **Mi biztosítja a Retraxil vérzéscsillapító hatását?**

A Retraxil 15% alumínium-kloridot tartalmaz, ami a sulcus tágításon, mint elsődleges hatáson kívül, a vérzéscsillapításért is „felel”. Az alumínium-klorid a fehérjék kicsapódását okozza, ami elzárja a sérült hajszálereket.

#### **Mennyi ideig kell a Retraxil pasztát a sulcusban tartani és utána miért kell onnan maradéktalanul kimosni?**

Az applikációt követően a Retraxilt két percig kell a sulcusban tartani. Ezután víz-levegő permittel, elszívás mellett teljes mértékben, maradéktalanul el kell távolítani. El kell kerülni a szignifikánsan hosszabb behatási időt, mert a paszta alumínium-klorid tartalma szöveti károsodást okozhat.

#### **Kompatibilis-e a Retraxil a sulcus tágító fonalakkal?**

Igen, a Retraxil kompatibilis a fonalakkal. A klinikai helyzettől és a fogorvos preferenciájától függően mély subgingivális preparációs határ esetén szükség lehet a Retraxil sulcus tágító fonallal kombinálni. Ebben az esetben azonban nem impregnált fonalat kell használni, hogy elkerüljük a különböző impregnálószerek esetleges nem kívánatos kölcsönhatásait. Először mindig a fonalat, majd a Retraxilt kell applikálni, sohasem fordítva. A 2 perc behatás után maradéktalanul ki kell mosni a sulcusból a Retraxilt. Ezután kell eltávolítani a fonalat, majd megtisztítani és leszárítani a fogat a lenyomatvételek előtt.

#### **Milyen hatása van a Retraxilnak az adhezív rendszerek bondjaira?**

Soha ne felejtsük el, hogy a retrakciós paszták ronthatják a dentin bondok rögzítőerejét. A használati útmutató értelmében: soha ne használjuk preparált fogfelszínen, mert a Retraxil csökkentheti a bondok rögzítőerejét a dentin felszínén.

### **A Retraxil pigmenteket tartalmaz – ez elszínezheti a fogat / restaurációt?**

A Retraxil kék pigmentet tartalmaz. A pigment koncentrációja pontosan kalibrált annak érdekében, hogy sem a fogon, sem a restauráción ne okozzon elszíneződést, amennyiben betartjuk a használati útmutatóban foglaltakat és a 2 perc behatási időt.

### **A Retraxil kompatibilis a lenyomatanyagokkal?**

A Retraxil kompatibilis a lenyomatanyagokkal (C- és A-szilikonok, valamint poliéterek), de mindig győződjünk meg róla, hogy a 2 perc behatási idő után teljes mértékben eltávolítottuk a pasztát a sulcusból. Amennyiben a Retraxilt nem távolítjuk el megfelelően a szájból, akkor negatívan befolyásolhatja a lenyomat minőségét.

### **Korrektív lenyomatvételi technika során, mikor kell használni a Retraxilt?**

Korrektív lenyomatvételi technika alkalmazása során, a Retraxilt az alaplenyomat levételét és kivágását követően kell alkalmazni. Ez biztosítja, hogy a korrektív anyag megfelelően befolyjon a frissen feltárgított és száraz sulcusba és tökéletesen lemintázza a preparáció határait.

## **Kiszereles**

### **Alkalmas-e a Retraxil többszöri felhasználásra?**

Az egyszerhasználatos kapszulákkal ellentétben, a Retraxil fecskendőes kiszerelesben kapható, ami többszöri felhasználást tesz lehetővé. A sterilizálás/fertőtlenítéssel kapcsolatban, kérjük olvassa el a használati útmutatót! Innovatív kiszerelesének köszönhetően a Retraxil kiválóan illeszkedik a kézbe, könnyen kezelhető és kiválóan applikálható a sulcusba. A fecskendő alkalmas nagyobb preparációk esetén is, ugyanakkor egyszerű tárolást tesz lehetővé.

### **Mi a csavaró segédeszköz célja?**

A csavaró segédeszköz lehetővé teszi a kanül biztonságos illeszkedését a fecskendőn és fájó ujjak nélkül biztosítja a kanül kényelmes le- és feltekerését a fecskendőre. Tehát egy állandó segítség a fecskendő használatához. A csavaró segédeszköz sterilizálható.

### **Használható más kanül is a Retraxil-lal?**

A Retraxil egy tökéletesen összehangolt rendszer és így is kell használni. A rendszert – a kanüllel együtt – egészségügyi eszközként engedélyeztették. A megfelelő kiszereles garantálja a termék kívánt teljesítményét, amikor a Retraxilt a sulcusba applikáljuk. Ráadásul a Retraxil kanüljének van a versenytársak között a legkisebb belső átmérője (0,9 mm), ami biztosítja a paszta atraumatikus applikációját a gingivális sulcusba.